



Sådan tager du overbliksbilleder af høj kvalitet

V1.3

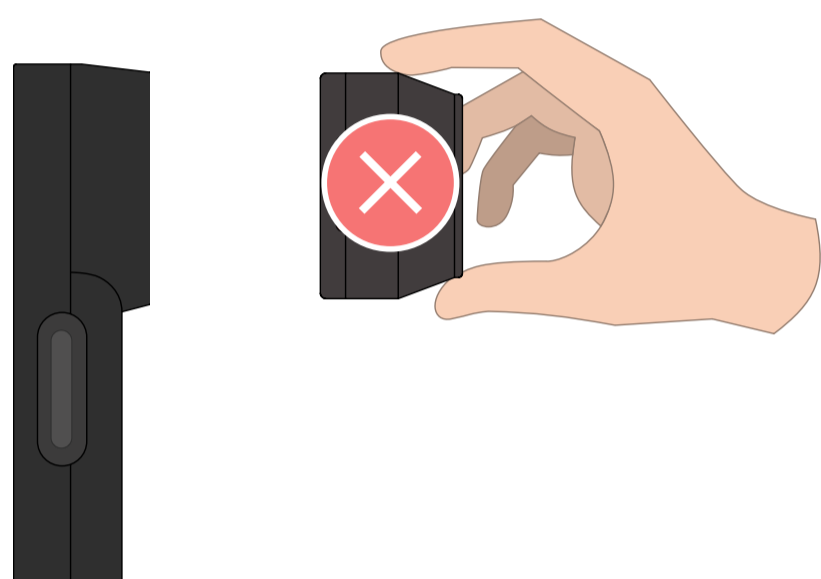


1. Sørg for, at dermatoskopet er afmonteret

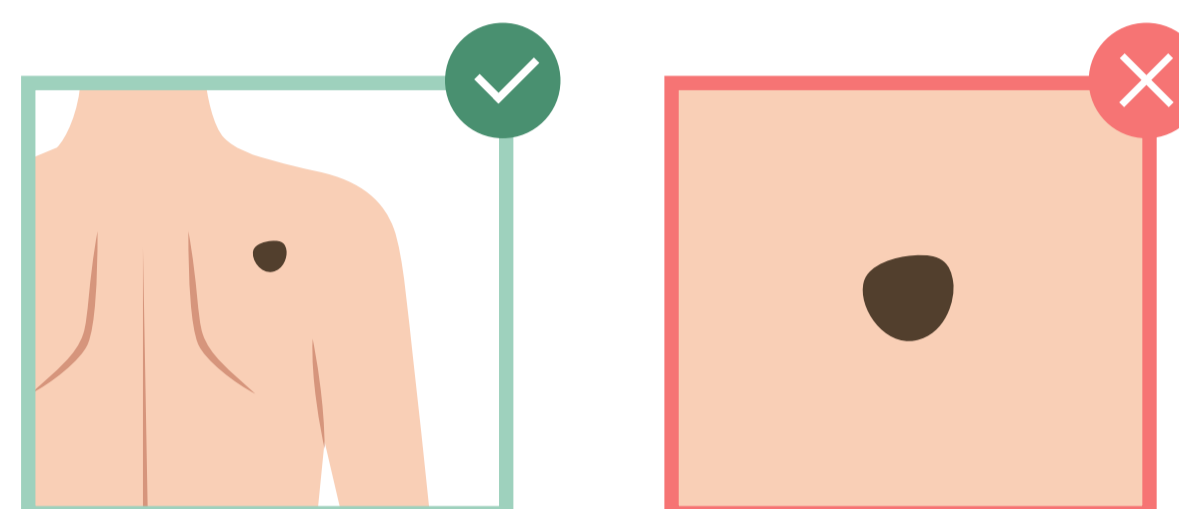

2. Placér kameraet i den korrekte afstand


- Korrekt afstand giver et overblik over læsionen og den omgivende hud, læsionen skal være tydelig og centreret i billedet.
- Hvis kameraet er for tæt på, kan billedet blive sløret og mangle kontekst omkring læsionen.
- Hvis kameraet er for langt væk, kan detaljerne i læsionen blive utydelige, når der zoomes ind på en stor skærm.

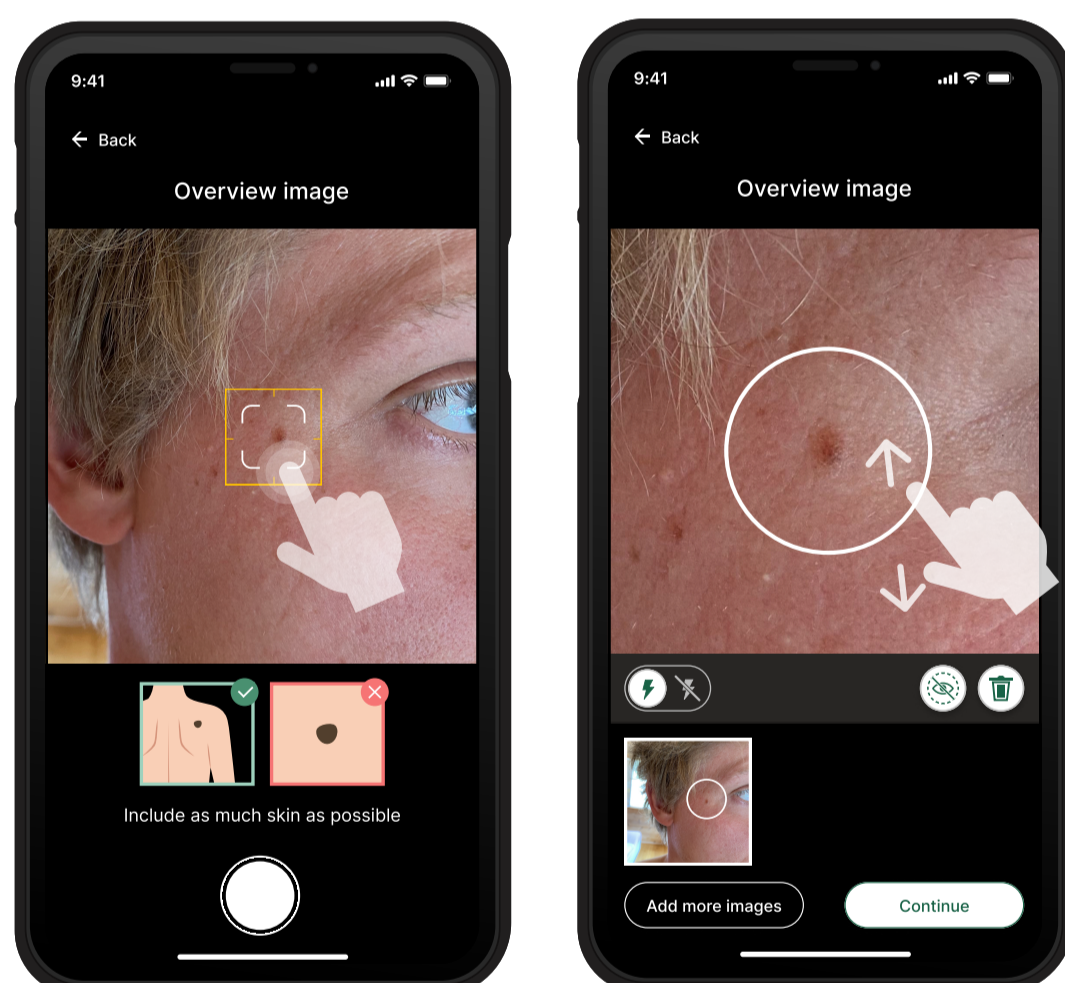


3. Sørg for, at billedet er skarpt og fokuseret

- **Tryk** altid på læsionen **på skærmen** for at fokusere kameraet på det ønskede område. Vent på, at den gule firkant vises.
- Sørg for at læsionen er **centreret i billedet**, er den ikke i cirklen, **flyt cirklen** så den omkranser læsionen.
- Efter du har taget billedet, tryk "**Forsæt**" og herefter **zoom ind** for at sikre, at læsionen er **skarp**.

Øg mængden af lys i rummet

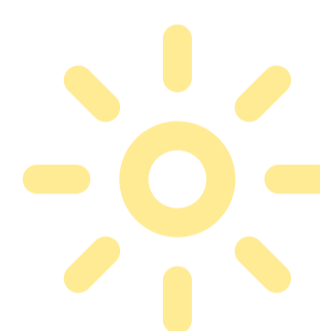

Hold kameraet stille

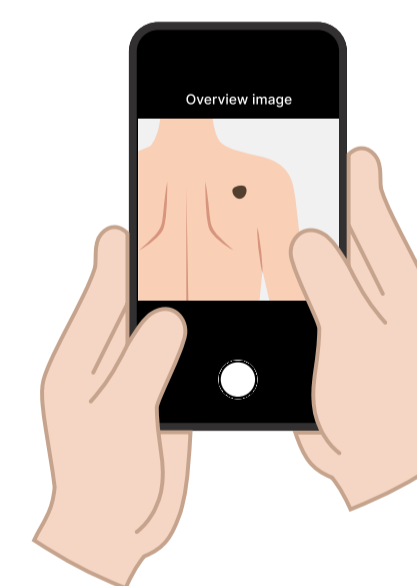

Rengør linsen



4. Får du stadig billeder af dårlig kvalitet?

- Sørg for, at der er meget lys i rummet.
- Husk at holde kameraet stille, når du tager billedet.
- **Rengør kameralinsen**, hvis billederne fortsat er slørede.

TEKNISK SUPPORT: (+45) 44 40 82 45 | BESØG MELATECH.IO/SUPPORT FOR FLERE HJÆLPEARTIKLER

Dette DermKit indeholder et CE-mærket dermatoskop, som er medicinsk udstyr (klasse I) fremstillet af tredjepart. Den medfølgende smartphone og Dermloop-softwaren udgør ikke medicinsk udstyr. Illustrationerne viser en typisk arbejdsgang.

For korrekt og sikker anvendelse af det medicinske udstyr henvises altid til fabrikantens brugsanvisning (IFU), som skal læses før brug. IFU er tilgængelig på melatech.io.

Importeret til EU af Melatech ApS | Trekronergade 126G, 2500 Valby | support@melatech.io